

Gebrauchsanweisung für Einlagenrohlinge und orthopädisches Zubehör



Bitte lesen Sie die vorliegende Gebrauchsanweisung sorgfältig durch, sie enthält viele wichtige Informationen und Sicherheitshinweise.

Hersteller: Birko Orthopädie GmbH
Weidenstraße 20
53562 St. Katharinen
Tel.: +49 (0) 2645 / 97 72-300
Fax: +49 (0) 2645 / 97 72-333
E-Mail: info@birko.de
Web: www.birko.de



Zweckbestimmung / Indikation

- Vorgefertigter orthopädischer Schuheinlagenrohling und deren Zubehör
- Orthesen/Fuß Knöchel

Einlagen sind funktionelle Orthesen zur Korrektur, Stützung oder Bettung von Fußdeformitäten, zur Entlastung oder Lastumverteilung der Fußweichteile, der Bein- oder auch Wirbelsäulengelenke. Einlagen sind den Gegebenheiten des Fußes anzupassen. Nur zur Verwendung mit gesunder und unverletzter Haut.

Hinweise

- Es kann eine Gewöhnungszeit der Füße an die Einlage nötig sein, eventuell die Tragezeit langsam erhöhen.
- Sollten allergische Reaktionen auftreten, muss das Tragen der Einlage sofort unterbrochen werden und ein Orthopädienschuhmacher oder Arzt hinzugezogen werden.
- Wird beim Tragen der Einlagen ein Schmerzempfinden oder Blasenbildung beobachtet, muss das Tragen der Einlage sofort unterbrochen werden und ein Orthopädienschuhmacher oder Arzt hinzugezogen werden.
- Ein nicht bestimmungsgemäßer Gebrauch kann durch Überlastung zu Materialermüdungen und im Extremfall zur Zerstörung der Einlage führen.
- Jede dauerhafte Rötung oder Hautveränderung bedarf der Kontrolle durch einen Fußspezialisten oder Arzt.
- Bei Empfindungsstörungen am Fuß ist eine Sichtkontrolle auf Hautveränderungen mehrmals täglich durchzuführen.

Anwendung

- Einlagen nur in dafür geeignetem Schuhwerk tragen.
- Schuhe und Einlagen müssen aufeinander abgestimmt sein.
- Einlagen müssen stets mit Strümpfen getragen werden.
- Bei Problemen mit der Einlage sofort einen Fußspezialisten aufsuchen.

Pflegehinweise (Reinigung/Desinfektion)

- Zur hygienischen Pflege empfehlen wir das Reinigen mit einem feuchten Tuch.
- Der Kontakt mit Säuren und Lösungsmitteln muss vermieden werden.
- Lederbezogene Einlagen zum Lüften aus dem Schuh nehmen und schonend trocknen.
- Die Einlagen nie der Heizung oder anderen direkten Wärmequellen aussetzen. Dies kann zu unerwünschten Materialveränderungen und Passformverlust führen.
- Falls die Einlage mit Körpersekreten in Verbindung gekommen sein sollte oder bei anderen starken Verunreinigungen, müssen alle bezogenen Einlagen ersetzt werden, da eine ausreichende Desinfektion nicht sichergestellt werden kann.
- Nur handelsübliche Fläschendesinfektionsmittel für Medizinprodukte aus Kunststoff verwenden
- Sollte die Einlage nicht speziell für Nassbereiche gefertigt sein darf sie nicht in solchen Bereichen eingesetzt werden.
- Sollten sich Veränderungen am Material zeigen, muss ein Orthopädienschuhmacher hinzugezogen werden.
- Die Einlagen sollten in regelmäßigen Abständen von einem Orthopädienschuhmacher kontrolliert werden, besonders bei Kindern, die sich noch im Wachstum befinden oder bei speziellen Indikationen.

Entsorgung

- Die Einlagen können gemäß den örtlichen Bestimmungen im normalen Hausmüll entsorgt werden.

Haftung

- Unsere Haftung erstreckt sich ausschließlich auf das Produkt in der von uns abgegebenen Form. Wurde die Einlage von Dritten verändert erlischt der Rechts- und Garantieanspruch.

Stand der Gebrauchsanweisung: 2010-10-05